

WASVOORSCHRIFT

De sensorbroekjes kunnen zonder te wassen direct worden gebruikt voor de plaswekkertraining.

Voor gebruikte broekjes is het raadzaam deze eerst in lauwwarm water uit te spoelen, voordat deze in de wasmachine worden gewassen.

Het is belangrijk dat u het regelmatig gebruik van waspoeder en/of wasverzachter vermijdt. De draden in het sensorbroekjes worden hierdoor vettig. Dit heeft een negatieve invloed op de gevoeligheid van de sensordraden en daarmee het alarmsignaal. Mocht u na verloop van tijd toch wat wasmiddel willen gebruiken, gebruik dan een kleine hoeveelheid **zonder** bleekmiddel. Bijvoorbeeld Dreet of Robijn.

Het is geen probleem de sensorbroekjes in de wasmachine te centrifugeren. De sensorbroekjes echter **nooit** met de hand droog wringen. Bent u in het bezit van een droger, dan kunnen de sensorbroekjes op de **koudste** stand hierin worden gedroogd.

Mocht u vragen hebben, zijn wij tijdens kantooruren altijd te bereiken!



Mennonietenbuurt 29
1427 AX Amstelhoek
Tel: 0297 - 760 001
Fax: 0297 - 760 002

WWW.URIFOON.NL • INFO@URIFOON.NL

